



Руководство пользователя A9

Пожалуйста, прочтите руководство перед использованием

	Содержание	1
	Описание изделия	2
	Наименование деталей	3
	Введение для проводного/беспроводного режима	4
	Как зарядить батарею	4
	Как применять картридж	5
	Регулировка длины	6
	Отображение и регулировка скорости	6
	Виды картриджей	7
	Справочная таблица	8
	Характеристика	8
	Предостережение	9
	Гарантия	10

Описание изделия

Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации. Прибор помогает более эффективно использовать антивозрастные сыворотки на поверхности кожи за счет быстрых микромассажных поступательных движений. В результате чего, происходит выработка собственного коллагена и быстрое впитывание сыворотки в кожу. **Без инъекций!** Для устройства разработано 7 различных типов картриджей. **Без инъекций!**



Инструкция для проводного/беспроводного режима

Проводная модель: Dr. pen A9-C
 Данная модель способна работать, только если она подключена к розетке переменного тока. Для работы подключите устройство к адаптеру с помощью кабеля питания, затем подключите адаптер к работающей розетке переменного тока.

Беспроводная модель: Dr. pen A9-W
 Данная модель работает от встроенного аккумулятора. Она может работать без провода. Кабель питания и адаптер используются для зарядки устройства, при разрядке аккумулятора.

Dr. pen A9 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Как зарядить батарею

Для зарядки устройства, подключите устройство к адаптеру с помощью кабеля питания, затем подключите адаптер к розетке переменного тока. Зарядка будет завершена в течение 1 часа.

Статус зарядки

- Индикатор горит красным - устройство заряжается.
- Индикатор горит зеленым - устройство полностью заряжено.

Как применять картридж

Подготовка

1. Достаньте картридж из стерилизованной упаковки. (Рис. 1)

(Рис. 1)

2. Найдите U-образную выемку на картридже, совместите выемку с точкой на нижней части устройства и легким движением вставьте картридж в устройство. (Рис. 2)

(Рис. 2)

3. Зафиксируйте картридж на устройстве, повернув его по часовой стрелке.
4. Для извлечения картриджа поверните его против часовой стрелки и выщипайте.
5. Запускайте устройство только в том случае, если картридж собран правильно. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

(Рис. 2)

Перед установкой картриджа, убедитесь, что U-образный конец картриджа совмещен с U-образной выемкой ручного блока.

Картридж предназначен для одноразового использования. Поместите использованные картриджи в мусорный контейнер. Если картридж случайно загрязнился во время установки (т. е. упал на пол, упаковка вскрыта/повреждена. Картридж может быть загрязнен). Пожалуйста, выбросьте его и используйте или приобретите новый.

Регулировка длины

Используйте подходящую глубину, в зависимости от области обработки и проблемы с кожей.

Отрегулируйте глубину, поворачивая кольцо регулировки шкалы. Глубину следует отрегулировать после запуска ручки. Номер шкалы, совпадающий с делением шкалы, показывает текущую глубину (Рис. 3).

(Рис. 3)

По часовой стрелке Против часовой стрелки
 Глубина будет меньше. Глубина будет больше.

Отображение и регулировка скорости

- 6L — Светодиодный индикатор скорости
- 5L —
- 4L —
- 3L — Синий индикатор загорается при запуске устройства.
- 2L —
- 1L —

6 Уровней скорости

Нажмите кнопку, чтобы изменить скорость. Включение еще одной лампочки означает увеличение скорости на 1 уровень.

Виды картриджей (преобретаются отдельно)

Доступные картриджи

12 игл 18 игл 24 иглы
 36 игл 46 игл R NANO S NANO

Внимание

Данные картридж предназначены только для Dr. pen A9, A11, A8S, M8S. Картридж одноразовый. Выбрасывайте использованный картридж в мусорный контейнер.



Справочная таблица

ЗОНА	ГЛУБИНА ИГЛЫ (ММ)
Лоб	0,25-0,5
Между бровей	0,25-0,5
Нос	0,25
Область вокруг глаз	0,25
Щеки и подбородок	0,5-1,0

Характеристика

Товарное наименование: Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации
 Наименование модели: Dr. pen A9
 Адаптер
 Входное напряжение: 100-240 В 50/60 Гц
 Выходное напряжение: 5 В-1000 мА
 Вес упаковки: 420 г
 Размер упаковки: 169*123*56 мм

Упаковочный лист

Позиция	Количество
Ручной блок	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Ручное	1 шт.
Кабель	1 шт.
Картридж	2 шт.

Предостережение

- Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием прибора и следуйте инструкциям.
- Противопоказания:
 1. Острые заболевания или заболевания крови, сопровождающиеся температурой выше 38°C
 2. Аллергия и гемофилия
 3. Меланоз на лице
 4. Высокая температура
 5. Постоянное визиты к врачу
 6. Прием лекарственных препаратов
 7. Возраст до 18 лет
- Не подключайте прибор к питанию, отличному от 220В переменного тока. Это может привести к возгоранию или неисправности.
- Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (возле увлажнителя). Это может привести к неисправности.
- Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.
- Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к порчению электрическим током.
- Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к пожару (обязательно замените его на новый).
- Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задиры. Они могут оцарапать кожу.
- Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от розетки.
- Обязательно пройдите технический контроль для проверки. Если обнаружены какие-либо неисправности, отремонтируйте прибор.
- Никто, кроме оператора, не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.

	Переменный ток		Серийный номер
	Постоянный ток		Представитель в ЕС
	Оборудование класса I		Маркировка CE
	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации		Производитель
	Дата изготовления		Обратитесь к инструкции по использованию

Гарантия

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев. Мы предлагаем услуги по ремонту с момента покупки. Если какой-либо из наших продуктов имеет повреждения или «естественные» проблемы, мы предоставляем услуги по замене или ремонту. Использование картриджей сторонних производителей может привести к повреждению вашего устройства. Это может привести к аннулированию вашей гарантии.

Общее техническое обслуживание

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Держите устройство с выключенным питанием. Протрите его поверхность дезинфицирующими салфетками.

Обязательно очистите такие области, как щели, швы и области вокруг места крепления картриджа к устройству.

Держите его вдали от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.

Не доверяйте измерение, ремонт или переделку устройства непрофессионалу.

Если вы не использовали устройство в течение длительного времени, убедитесь, что оно работает должным образом и безопасен.