



# ***Dr. pen* E30**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД  
НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



## Название комплектующего





## Как пользоваться

### Беспроводная модель: Dr pen E30-W

Инструмент работает как от встроенного аккумулятора, так и при питании от сети переменного тока.

### Беспроводная модель: Dr pen E30-C

Инструмент используется только при питании от сети переменного тока.

Чтобы зарядить изделие, подсоединить кабель питания с переходником к интерфейсу питания в изделии и вставить переходник в находящуюся под напряжением розетку переменного тока.

Зарядка завершится примерно через 2 часа.

### Статус зарядки



● Состояние зарядки

Индикатор питания загорится зеленым после завершения зарядки



## Как применять картридж

### Подготовка

1. Вынуть картридж из стерилизованной упаковки.
2. Найдите U-образную выемку на картридже, совместите выемку с точкой на нижней части устройства и легким движением вставьте картридж в устройство.
3. Зафиксируйте картридж на устройстве, повернув его по часовой стрелке.
4. Для извлечения картриджа поверните его против часовой стрелки и вытащите.



5. Запускайте устройство только в том случае, если картридж собран правильно. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

### Внимание

Перед установкой картриджа, убедитесь, что U-образный конец картриджа совмещен с U-образной выемкой ручного блока.

Картридж предназначен для одноразового использования. Поместите использованные картриджи в мусорный контейнер. Если картридж случайно загрязнился во время установки (т. е. упал на пол, упаковка вскрыта/повреждена. Картридж может быть загрязнен). Пожалуйста, выбросьте его и используйте или приобретите новый.



## Регулировка длины

Используйте подходящую глубину, в зависимости от области обработки и проблемы с кожей.

Отрегулируйте глубину, поворачивая кольцо регулировки шкалы. Глубину следует отрегулировать после запуска ручки. Номер шкалы, совпадающий с делением шкалы, показывает текущую глубину



Глубина будет меньше

Против часовой стрелки

Глубина будет выше

### 5 Уровней скорости

Чтобы запустить или отключить изделие, необходимо нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд. После запуска изделия при каждом нажатии на кнопку питания будет происходить изменение скорости.



## Виды картриджей (приобретаются отдельно)



L1



R3-M



R5



F3



F5




F7



F9



9

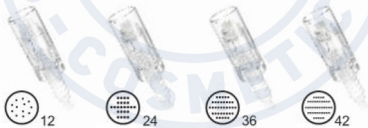

12




24



36



42

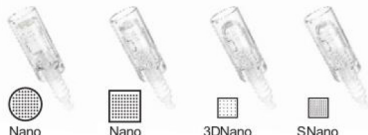

Nano



Nano



3DNano



SNano



## Характеристики

**Название продукта:**

**Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации**

Название модели: Dr.pen E30

Адаптер: 5В-1000 мА

Вес упаковки: 318 г












Размер упаковки: 169\*123\*56 мм

**Товарная накладная**

Предмет	Количество
Манипула	1 шт
Адаптер	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Кабель питания	1 шт
Картридж	2 шт



## Меры предосторожности

	Обязательно прочтите инструкции перед использованием и следуйте их указаниям.
	Не применять к тем лицам: 1. У кого есть острое заболевание или болезнь крови при температуре выше 38С. 2. У кого есть аллергия и гемофилия 3. У кого меланоз лица 4. У кого повышенная температура тела 5. Кто постоянно посещает больницу. 6. Кто принимает лекарства 7. В возрасте до 18 лет.
	Не используйте его от источника питания, отличного от источника питания с напряжением 220 В переменного тока. Это может вызвать возгорание или неисправность.
	Не использовать в пыльных или влажных помещениях, местах с высокой температурой воздуха. (Рядом с увлажнителем). Может вызвать неисправность.
	Не ремонтировать, не разбирать и не переделывать контроллер и корпус. Может вызвать неисправность.
	Не прикасаться к устройству и не отсоединять шнуры питания мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
	Не используйте шнур с защищенной изоляцией или подложку. Это может вызвать возгорание (Обязательно замените его другим)
	Не используйте подерганный шнур, на котором есть трещины или изломы. Это может вызвать шрамы на коже.
	При неиспользовании в течение длительного времени, отключите устройство от розетки.
	Обязательно проведите осмотр для проверки. При обнаружении неисправностей отремонтируйте.
	Никому кроме оператора не разрешается прикасаться к устройству. Это может стать причиной несчастного случая или неисправности.

	Переменный ток		Серийный номер
	Постоянный ток		Представитель ЕС
	Оборудование класса I		Знак CE
	Внимание, обратитесь к сопроводительной документации.		Производитель
	Дата производства		Незаземлённая рабочая часть





## Гарантия

---

Гарантийный срок на данное устройство составляет 6 месяцев. Мы предлагаем осуществлять поддержку наших изделий со дня их приобретения. Если какое-либо из наших изделий имеет повреждения или естественные проблемы, можем предложить их ремонт или замену

### **Общее техническое обслуживание**

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Храните устройство в выключенном состоянии. Протирайте поверхность устройства сухой тканью.

Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, воздействия высокой температуры и влажности.

Не разрешайте производить измерение, ремонт или изменение устройства неквалифицированному персоналу.

Если вы используете устройство, которое не использовалось в течение длительного времени, обязательно проверьте, не подвергает ли работа устройства опасности пользователя.

**VBG-COSMETIC**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**